

**SCHEMAT POBORU PRÓBEK KA/ U DO BADANIA NA NOSICIELSTWO
DO STERYLNEGO POJEMNICZKA NA KA/**

Próbki ka/ u należy pobierać przez trzy kolejne dni i do momentu dostarczenia ich do punktu przyjmowania próbek przechowywać w temperaturze lodówki:

- pierwszą próbkę ka/ u należy pobrać do sterylnego pojemniczka na ka/ u
- drugą próbkę ka/ u należy pobrać do sterylnego pojemniczka na ka/ u w dniu przyjęcia próbek do laboratorium.

Obydwie próbki dostarczyć w pierwszym dniu przyjmowania próbek przez laboratorium.

- trzecią próbkę należy pobrać do sterylnego pojemniczka na ka/ u kolejnym dniu przyjmowania próbek przez laboratorium i niezwłocznie dostarczyć do laboratorium.

Wypełnione zlecenie na badanie należy skutecznie zabezpieczyć przed kontaktem z próbkami.

POBIERANIE PRÓBKI KA/ U DO STERYLNEGO POJEMNICZKA NA KA/

1. Wyjąć korek z śpatki z plastikowego pojemniczka na ka/ u
2. Umieścić koniec śpatki w wieńcu
3. Trzymając za korek nabrać na śpatkę niewielką ilość ka/ u odpowiadając wielkości ziarna grochu.
4. Szczelnie zamknąć pojemniczek korkiem.
5. Wpisać na etykietę drukowanymi literami: nazwisko, imię oraz datę i godzinę pobrania próbki.